

TEST RAPID PENTRU SIFILIS

ref. 26084

(Kit pentru autotestare)

CONSIDERAȚII GENERALE:

Sifilis este o boală venerică care progresează, trecând prin stadii distincte ale bolii: primar, secundar, terțiar și cuaternar. Aceste stadii produc diverse simptome clinice, inițial aparând o leziune denumită "sancru", apoi erupția sifilitică urmată de perioade lungi "dormande". Negratată, boala poate duce la probleme cardiovasculare și neurosifilis.

Cauză de un spirochet: "Treponema pallidum" (TP), infecția este transmisă prin contact sexual, deși boala poate fi transmisă și prin transfuzia de sânge infectat. De asemenea, loc și infecția intruterină. S-a dovedit că organismul este imposibil de cultivat în mediu artificial, astfel că diagnosticul infecției, în mod normal, depinde de detectarea anticorpilor în sânge, curând după infecția inițială.

Testul de Sifilis Veneris, este un test specific rapid, înalt imunologic pentru detectarea anticorpilor anti-TP dintr-o probă de sânge integral.

PREZENTARE:

Cutia conține materialul necesar pentru efectuarea testului

1 pungă de aluminiu sigilată conținând:

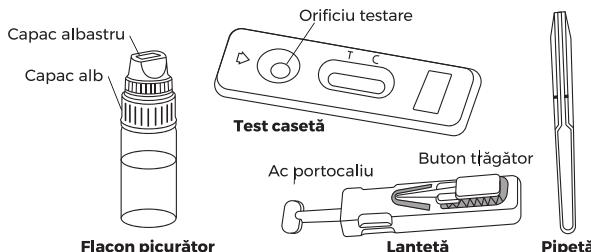
1 test casetă, 1 pungă cu desicant, 1 pipetă din plastic.

Deschideți folia protectoră doar când sunteți gata să efectuați testul. Punga cu desicant nu trebuie utilizată.

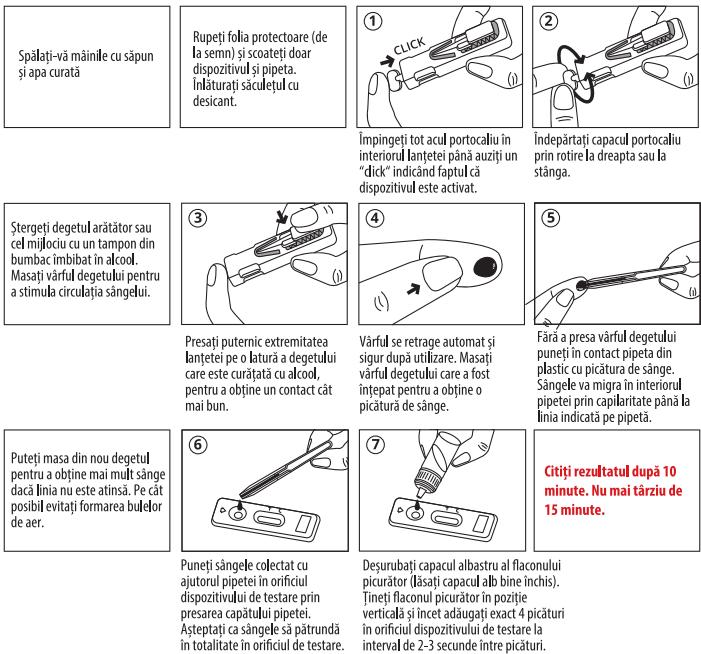
1 flacon picurător conținând 1ml de diluant

1 lanțetă sterilă pentru proba de sânge

instrucțiuni de utilizare.

**PRECAUȚII:**

1. Acest test este numai pentru diagnostic in vitro. Numai pentru uz extern. A nu se îngheță!
2. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de efectuarea testului.
3. Testul este de încredere doar dacă instrucțiunile sunt respectate cu grijă. Respectați numărul indicat de picături și timpul de citire.
4. A se păstra la o temperatură între 4 și 30 de grade Celsius. A nu se îngheță!
5. Nu se utilizează după data de expirare inscrisă pe ambalaj și pe folie. Nu utilizați testul dacă folia protectoră de aluminiu este deteriorată.
6. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7. După utilizare, toate componentele vor fi aruncate la gunoi.

PROCEDURA:**REZULTAT POZITIV**

Două linii colorate apar în fereastră sub semnele T (Test) și C (Control). Intensitatea culorii liniei T poate fi mai clară decât intensitatea liniei C. Acest rezultat înseamnă că proba de sânge conține anticorpi anti-TP și că trebuie să consultați un medic.



*Vă rugăm să citiți rezultatul afișat de caseta de testare după 10 minute. Dacă timpul de citire depășește 15 minute, rezultatul nu va fi corect. Intensitatea culorii liniei nu are nicio importanță pentru interpretarea rezultatului.

INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI:**Cum funcționează Testul de Sifilis Veneris?**

Când este prezent în organism, TP induce producerea de anticorpi specifici de către sistemul imunitar. Acești anticorpi circulați sunt capabili să recunoască spirochetii și să se lipească de ei. Testul Veneris detectează în mod specific acești anticorpi anti-TP în sânge și, prin urmare, arată prezența spirochetelor.

Când se poate utiliza acest test?

Testul Veneris trebuie efectuat în cazul apariției simptomelor clinice, cele mai importante fiind sancrele și erupția cutanată specifică. Testul poate fi efectuat în orice moment al zilei.

Rezultatele pot fi incorecte?

Rezultatele sunt corecte în măsură în care instrucțiunile sunt respectate cu atenție. Cu toate acestea, rezultatul poate fi incorect dacă testul Veneris se umezește înainte de efectuarea testării sau dacă cantitatea de sânge adăugată în orificiul casetei nu este corectă. Pipeta furnizată în cutie vă permite să vă asigurați că volumul de sânge colectat este corect. Stadiul foarte incipient al infecției ar putea duce, de asemenea, la rezultate negative datorită concentrației scăzute de anticorpi anti-TP în sânge.

Cum să interpretați testul dacă culoarea și intensitatea liniilor sunt diferite?

Culoarea și intensitatea liniilor nu au importanță pentru interpretarea rezultatelor. Liniile trebuie să fie omogene și vizibile. Testul ar trebui să fie considerat pozitiv indiferent de intensitatea culorii liniei de testare.

Ce reprezintă linia care apare sub semnul C (Control)?

Când apare această linie, înseamnă că testul a fost efectuat corect.

Dacă am citit rezultatul după 15 minute, testul va fi de încredere?

Nu. Testul trebuie citit în 10 minute după adăugarea diluantului. Rezultatul este sigur dacă citirea se realizează până la 15 minute.

Ce trebuie să fac dacă rezultatul este pozitiv?

Dacă rezultatul este pozitiv, înseamnă că anticorpii anti-TP sunt prezentați în sânge, că trebuie să consultați un medic și să îl arătați rezultatelor testului. Apoi medicul va decide dacă trebuie efectuată o investigație suplimentară.

Ce trebuie să fac dacă rezultatul este negativ?

Dacă rezultatul este negativ, înseamnă că testul nu a putut detecta anticorpi anti-TP în proba de sânge. Într-o mare parte, este recomandat să consultați un medic dacă simptomele persistă.

Care este precizia Testului de Sifilis Veneris?

Testul Veneris este corect și a fost folosit de mai bine de 15 ani de către profesionistii din domeniul său. Deși acest test este de încredere, pot fi obținute rezultate false pozitive sau false negative. Rapoartele de evaluare indică un acord general de cel puțin 97,8% cu metodele de referință.

VEDA . LAB ...

Rue de l'Expansion - ZAT du Londeau - Cerise BP 181 - 61006 ALENCON Cedex (France)

Lanțeta sterilă: STERILE R CE_0120

Owen Mumford Ltd

Brook Hill, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TU (UK)
LOT

DATA EXPIRĂRII:

REF 26084 Revizuit 05/2017

IMPORTATOR: S.C. Self Care Medical S.R.L.
Tel: (+4) 021 264 39 50 | www.veneris.ro

Veneris

DISTRIBUITOR: S.C. Self Care Medical S.R.L.

CE_0483

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare

Acreditate CE

Dispozitiv de diagnostic in vitro

Unică folosință. A nu se reutiliza!

A se păstra la temperaturi cuprinse între 4-30°C