

TEST RAPID 10 DROGURI DIN SALIVĂ

barza®
SELF CARE

Detectează prezența în salivă a 10 tipuri de droguri:
Marijuana/Cannabis, Cocaină, MDMA/Ecstasy,
Amfetamină, Metamfetamină, Metadonă, Oxicononă,
Fentanil, Opiace, Benzodiazepine

3 minute 

PREZENTARE

Testul de droguri din salivă detectează calitativ prezența principalelor droguri în fluidele orale umane, în limitele de detecție specifice: Marijuana/ Cannabis (THC), Cocaină (COC), Ecstasy/ Metilendioximet-amfetamină (MDMA), Amfetamină (AMP), Metamfetamină (MET), Metadonă (MTD), Oxicononă (OXY), Fentanil (FTY), Opiace (OPI), Benzodiazepine (BZO).

Pentru autotestare, nu pentru diagnostic in vitro.

Testul rapid este un test imunologic cromatografic cu flux lateral pentru detectarea simultană și calitativă a mai multor droguri și metaboliți ai drogurilor în salivă la următoarele concentrații limită:

Parametru	Substanța de calibrare	Limită de detecție (ng/mL)
Marijuana/Cannabis (THC)	11-nor- Δ^9 -THC-9-COOH	25
Cocaină (COC)	Benzilecgonină	20
Ecstasy/ Metilendioximet-amfetamină (MDMA)	d, l - metilendioximetamfetamină	100
Amfetamină (AMP)	d-amfetamină	50
Metamfetamină (MET)	d-metamfetamină	50
Metadonă (MTD)	Metadonă	30
Oxicononă (OXY)	Oxicononă	20
Fentanil (FTY)	Fentanil	30
Opiace (OPI)	Morfina	40
Benzodiazepine (BZO)	Oxazepam	30

Acest test oferă doar un rezultat preliminar. Pentru a obține un rezultat analitic confirmat, trebuie utilizată o metodă chimică alternativă mai specifică. Cromatografia gazoasă/ spectrometria de masă (GC/MS) este metoda de confirmare preferată. Trebuie o interpretare profesională pentru orice rezultat al testului pentru consumul de droguri, în special atunci când sunt indicate rezultate preliminare pozitive.

PRECAUȚII

- Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de efectuarea testului.
- Pentru autotestare, nu pentru diagnostic in vitro.
- Doar pentru uz extern.
- Nu utilizați după data de expirare.
- Testul trebuie să rămână în plicul sigilat până la utilizare.
- Nu utilizați testul dacă plicul sigilat este rupt sau deteriorat.
- Pentru o singură utilizare. Aruncați-l după utilizare.
- Proba de fluid oral contaminată sau alterată poate da rezultate false.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

DEPOZITARE ȘI STABILITATE

A se păstra așa cum este ambalat, în plicul sigilat, la 2-30°C. Testul este stabil până la data de expirare imprimată pe plicul sigilat. Testul tip Cup trebuie să rămână în plicul sigilat până la utilizare. A se păstra departe de lumina directă a soarelui, umiditate și căldură. NU CONGELAȚI. Nu utilizați după data de expirare.

COLECTAREA ȘI PREPARAREA SPECIMENULUI

Proba de fluid oral trebuie colectată utilizând colectorul furnizat în kit. Urmăriți instrucțiunile detaliate de utilizare de mai jos. Nu trebuie utilizat niciun alt tub de colectare pentru acest test. Se poate utiliza fluidul oral colectat în orice moment al zilei.

CONȚINUTUL CUTIEI

- Dispozitiv de testare Cup
- Colector pentru salivă
- Prospect cu instrucțiuni de utilizare

Materiale nefurnizate:

- Cronometru

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Lăsați testul și proba să atingă temperatura camerei (15-30°C) înainte de testare.

Nu trebuie introdus nimic în gură, inclusiv alimente, băuturi, gumă de mestecat sau produse din tutun, timp de cel puțin 10 minute înainte de colectare.


① Scoateți colectorul din plicul sigilat și colectați proba de fluid oral după cum urmează:

Important: Plasați limba pe maxilarul superior, inferior și rădăcini pentru a îmbogăți fluidul oral înainte de colectarea fluidului oral.

Introduceți capătul buretelui în gură, tamponați în jurul gingiilor de pe ambele părți ale gurii și sub limbă și mestecați buretele cu delicatețe, plasați capătul buretelui sub limbă timp de 2-3 minute până când este complet saturat. Apăsarea ușoară a buretelui între limbă și dinți va ajuta la saturare. Nu trebuie să simțiți părți dure pe burete atunci când este saturat.

② Scoateți colectorul din gură. Introduceți colectorul de salivă saturat în cupa de testare și înșurubați colectorul pentru a apăsa complet buretele și pentru a elibera fluidul oral. Așezați cupa de testare pe o suprafață curată și plană. Îndepărtați eticheta detașabilă, așteptați ca fluxul să apară în ferestrele de testare și porniți un cronometru. Dacă fluxul nu apare după 3 minute, rotiți cupa de testare pentru a uda testul.

③ Citiți rezultatul testului după 3-10 minute. Dacă toate liniile sunt clar vizibile după 3 minute sau mai devreme, atunci testul poate fi interpretat ca negativ. Dacă o linie nu este vizibilă după 3 minute, atunci testul trebuie recitit la 10 minute.

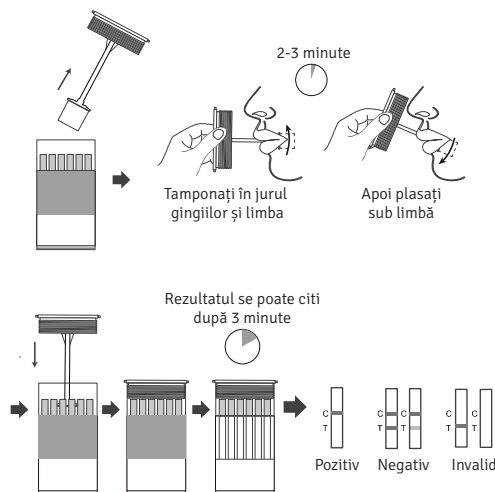

INTERPRETAREA REZULTATULUI

	NEGATIV: Apar două linii colorate. O linie de control apare lângă litera „C”, iar cealaltă linie de testare apare lângă litera „T”.
	POZITIV: Apare o singură linie de control colorată lângă litera „C”. Nicio linie de testare colorată nu apare lângă litera „T”.
	INVALID: Nu apare nicio linie de control lângă litera „C”.

IMPORTANT: Rezultatul obținut este considerat preliminar. Proba trebuie testată de un laborator pentru a se confirma rezultatul.

INFORMAȚII UTILE

1. Cum știu dacă testul a funcționat bine?
Când apare linia de control (C), înseamnă că testul a funcționat bine.
2. Cât de repede pot citi rezultatul?
Puteți citi rezultatul după 3 minute, atâta timp cât o linie colorată a apărut lângă regiunea de control (C). Nu citiți rezultatul după 5 minute.
3. Care este cel mai bun moment pentru a efectua testul?
Puteți efectua testul în orice moment al zilei.
4. Cum se interpretează testul dacă intensitatea și culoarea liniilor sunt diferite?
Culoarea și intensitatea liniilor nu au nicio importanță pentru interpretarea rezultatului. Testul trebuie considerat negativ, indiferent de intensitatea culorii liniei de testare (T).
5. Ce este un test fals pozitiv?
Un rezultat fals pozitiv înseamnă că drogul nu este prezent, dar se pare că a fost detectat de test. Cele mai frecvente cauze ale unui test fals pozitiv sunt reacțiile încrucișate.
6. Ce este un test fals negativ?
Un rezultat fals negativ înseamnă că drogul este prezent, dar nu este detectat. Dacă proba de salivă este diluată sau este contaminată, acest lucru poate duce la un rezultat fals negativ.

LIMITĂRI

1. Testul oferă doar un rezultat calitativ, preliminar. Trebuie utilizată o metodă analitică secundară pentru a obține un rezultat confirmat. Cromatografia de gaze/ spectrometria de masă (GC/MS) sau cromatografia lichidă-spectrometria de masă în tandem (LC-MS) sunt metode de confirmare preferate.
2. Un rezultat pozitiv al testului nu indică concentrația drogului din probă sau calea de administrare.
3. Un rezultat negativ poate să nu indice neapărat o probă fără prezența unui drog. Drogul poate fi prezent în probă sub nivelul limită al testului.

BIBLIOGRAFIE

1. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 488


INDEX SIMBOLURI

	Consultați instrucțiunile înainte de utilizare		Teste per kit
	A se păstra la temperaturi între 2° și 30° C		Producător
	Număr lot		Număr catalog
	Atenție		Data expirării
	A nu se reutiliza		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Reprezentant autorizat		

 Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. #550, Yinhai Street, Hangzhou Economic & Technological Development Area, Hangzhou 310018 P.R. China
web: www.alltests.com.cn email: info@alltests.com.cn

 VidaQuick Biotech S.L. No. 132, Rosello Street, Barcelona, Barcelona Province, 08036, Spania
Email: info@vidaquick.com

Încearcă și
**TEST RAPID
17 DROGURI
DIN URINĂ**

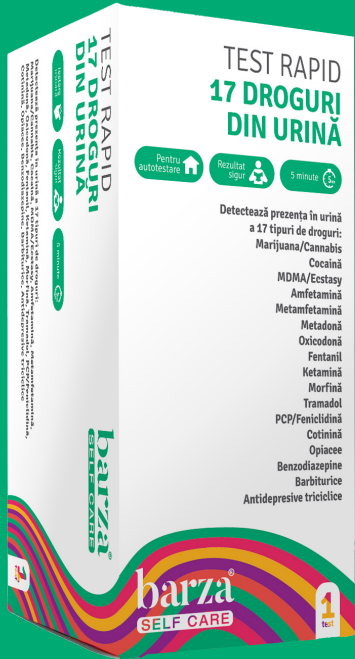

Pentru
autotestare

Rezultat
sigur

5 minute

Distribuitor: SELF CARE MEDICAL S.R.L.
Str Pipera Tunari nr. 51, Voluntari, jud. Ilfov
T: 021 264 39 50; E: office@scdg.ro;
www.selfcaremedical.ro

TELVERDE
0800 822 792
Luni - Vineri: 9:00 - 17:00