

TEST RAPID 17 DROGURI DIN URINĂ

barza®
SELF CARE

Detectează prezența în urină a 17 tipuri de droguri:
Marijuana/Cannabis, Cocaină, MDMA/Ecstasy, Amfetamină, Metamfetamină, Metadonă, Oxicononă, Fentanil, Ketamină, Morfină, Tramadol, PCP/Fenclidină, Cotinină, Opiace, Benzodiazepine, Barbiturice, Antidepresive triciclice

5 minute 

Testul rapid de droguri detectează calitativ mai multe medicamente și metaboliți ai medicamentelor în urina umană. Pentru autotestare, nu pentru diagnostic in vitro.

ASPECTE GENERALE

Testul rapid este un test rapid de screening al urinei care poate fi efectuat fără utilizarea niciunui instrument. Testul utilizează anticorpi monoclonali pentru a detecta selectiv niveluri ridicate ale unor medicamente specifice în urină. Testul rapid 17 droguri din urină este un test imunocromatografic rapid pentru detectarea calitativă a mai multor medicamente și metaboliți ai medicamentelor în urină la următoarele concentrații limită:

Parametru	Substanța de calibrare	Limită de detecție (ng/mL)
Marijuana/Cannabis (THC)	11-nor-Δ ⁹ -THC-9-COOH	50 / 20
Cocaină (COC)	Benzilecgonină	300 / 150
Ecstasy/ Metilendioximet -amfetamină (MDMA)	d, 1 - metilendioximetamfetamină	500
Amfetamină (AMP)	Amfetamină	1000 / 500
Metamfetamină (MET)	D-metamfetamină	1000 / 500
Metadonă (MTD)	Metadonă	300
Oxicononă (OXY)	Oxicononă	100
Fentanil (FTY)	Norfentanil	20
Ketamină (KET)	Ketamină	1000
Morfină (MOP)	Morfină	300
Tramadol (TRA)	Cis - Tramadol	200
Fenclidină (PCP)	Fenclidină	25
Cotinină (COT)	Cotinină	100
Opiace (OPI)	Morfină	2000
Benzodiazepine (BZO)	Oxazepam	300
Barbiturice (BAR)	Secobarbital	300
Antidepresive triciclice (TCA)	Nortriptilină	1000

Testul oferă doar rezultate preliminare. Pentru a obține un rezultat analitic confirmat, trebuie utilizată o metodă chimică alternativă mai specifică. GC/MS sau LC/MS este metoda de confirmare preferată.

Prin parametrul Cotinină (COT), un metabolit al nicotinei, testul poate identifica inclusiv consumul de nicotină din orice sursă.

PRECAUȚII

- Citiți întregul prospect înainte de a efectua testul.
- Pentru autotestare, nu pentru diagnostic in vitro.
- Doar pentru uz extern.
- Nu utilizați testul după data de expirare imprimată pe ambalaj.
- Nu utilizați testul dacă ambalajul din folie este rupt sau deteriorat.
- Pentru o singură utilizare. Aruncați după prima utilizare.
- Dispozitivul de testare trebuie să rămână în plicul sigilat până la utilizare.
- Proba de urină contaminată sau alterată poate da rezultate false.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CONȚINUTUL CUTIEI

- 1 plic sigilat, din aluminiu, ce conține 1 dispozitiv Cup
- 1 prospect cu instrucțiuni de utilizare

Materiale nefurnizate:

- Cronometru
- Recipient pentru colectarea probei de urină

DEPOZITARE ȘI STABILITATE


A se păstra așa cum este ambalat, în plicul sigilat, la 2-30°C până la data expirării. A se păstra ferit de lumina directă a soarelui, umiditate și căldură. A NU SE CONGELA.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Lăsați testul să ajungă la temperatura camerei (15-30°C) înainte de testare. Spălați-vă bine pe mâini.

Pasul 1: Pregătirea

- Scoateți dispozitivul de testare Cup din plicul sigilat și utilizați-l imediat.
- Deschideți capacul și colectați urina în dispozitiv; proba de urină trebuie să depășească linia minimă de nivel de urină.
- Închideți bine capacul.

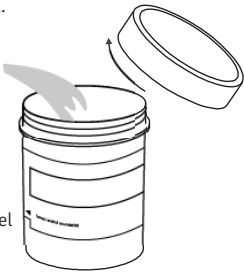

linia minimă de nivel


Pasul 2: Îndepărtați eticheta

- Îndepărtați eticheta de pe corpul dispozitivului de testare Cup pentru a vizualiza fereastra rezultatului testului.



Pasul 3: Citiți rezultatele

- Citiți rezultatele testului la 5 minute, nu le citiți după 10 minute.

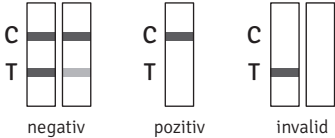

INTERPRETAREA REZULTATULUI

 negativ	NEGATIV: Apar două linii colorate. O linie de control apare lângă litera „C”, iar cealaltă linie de testare apare lângă litera „T”.
 pozitiv	POZITIV: Apare o singură linie de control colorată lângă litera „C”. Nicio linie de testare colorată nu apare lângă litera „T”.
 invalid	INVALID: Nu apare nicio linie de control lângă litera „C”.

IMPORTANT: Rezultatul obținut este cu caracter preliminar.
Proba trebuie testată de laborator pentru a confirma rezultatul.

INFORMAȚII UTILE

1. Cum știu dacă testul a funcționat bine?

Când apare linia de control (C), înseamnă că unitatea de testare funcționează bine.

2. Cât de repede pot citi rezultatele?

Puteți citi rezultatele după 5 minute, atâta timp cât apare o linie roșie sau roz lângă regiunea de control (C), nu citiți rezultatele după 10 minute.

3. Care este cel mai bun moment pentru a efectua testul?

Puteți efectua testul în orice moment al zilei.

4. Cum se citește testul dacă culoarea și intensitatea liniilor sunt diferite?

Culoarea și intensitatea liniilor nu au nicio importanță pentru interpretarea rezultatelor. Testul trebuie considerat negativ, indiferent de intensitatea culorii liniei de test (T).

5. Ce este un test fals pozitiv?

Un rezultat fals pozitiv înseamnă că medicamentul nu este prezent, dar se pare că a fost detectat de dispozitiv. Cele mai frecvente cauze ale unui test fals pozitiv sunt reacții încrucișate.

6. Ce este un test fals negativ?

Un test fals negativ înseamnă că medicamentul este prezent, dar nu este detectat de dispozitiv. Dacă proba este diluată sau este contaminată, acest lucru poate duce la un rezultat fals negativ.

LIMITĂRI

- 1. Testul este destinat utilizării exclusive cu urină umană.
- 2. Testul oferă doar un rezultat preliminar.
- 3. Prezența unor substanțe precum înălbitor și/sau alau în proba de urină poate produce rezultate incorecte. Dacă se suspectează un rezultat fals, testul trebuie repetat cu o altă probă de urină.
- 4. Testul nu face distincție între consumul de droguri și anumite medicamente.
- 5. Un rezultat pozitiv al testului poate fi obținut din anumite alimente sau suplimente alimentare.

INDEX SIMBOLURI

	Consultați instrucțiunile înainte de utilizare		Teste per kit
	A se păstra la temperaturi între 2° și 30° C		Producător
	Număr lot		Număr catalog
	Atenție		Data expirării
	A nu se reutiliza		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Reprezentant autorizat		


Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. #550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou 310018 P.R. China
web: www.alltests.com.cn **email:** info@alltests.com.cn

VidaQuick Biotech S.L. No. 132, Rosello Street,
Barcelona, Barcelona Province, 08036, Spania
Email: info@vidaquick.com

DOA-1177H-A13

Încearcă și

**TEST RAPID
10 DROGURI
DIN SALIVĂ**

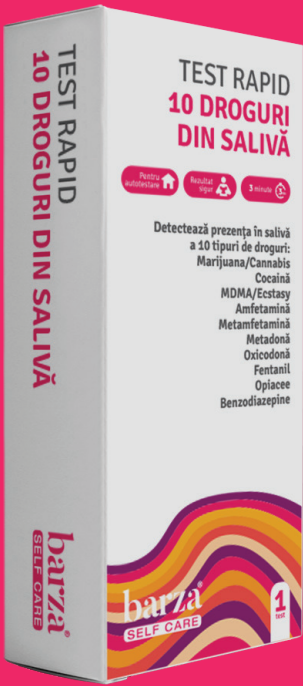

Pentru autotestare

Rezultat sigur

3 minute

Distribuitor: SELF CARE MEDICAL S.R.L.
Str Pipera Tunari nr. 51, Voluntari, jud. Ilfov
T: 021 264 39 50; E: office@scdg.ro;
www.selfcaremedical.ro

TELVERDE
0800 822 792
Luni - Vineri: 9:00 - 17:00